



POLICETTIVO® GKBOX



Sinergia di proprioccezione ed esterocezione per la riabilitazione posturale mirata.

CONTENUTI

01

Introduzione al Sistema Policettivo

Descrizione generale del sistema, la sua origine, e gli obiettivi principali.

02

Principi della Propriocezione

Spiegazione del concetto di propriocezione e il suo ruolo nel Sistema Policettivo.

03

Tecnologie e Strumenti:

Presentazione degli strumenti chiave come Physiocheck, Cuscini Policettivi Elicoidali, GKBOX®, e Solette Posturali Proprioceettive.

04

Applicazioni Cliniche

Esempi di come il sistema viene applicato in contesti clinici, inclusi casi studio e feedback dei pazienti.

05

Valutazione Posturale Avanzata

Approfondimento sulle tecniche di valutazione posturale nel Sistema Policettivo.

06

Formazione e Certificazione

Informazioni su come i professionisti possono essere formati e certificati nell'utilizzo del sistema.

07

Ricerca e Sviluppo

Panoramica delle ricerche scientifiche e degli sviluppi tecnologici alla base del sistema.

08

Benefici e Risultati

Analisi dei benefici del sistema e dei risultati ottenuti nei pazienti trattati con il Sistema Policettivo.





01

Introduzione

Il Sistema Policettivo è utile per fisioterapisti e medici perché offre un approccio integrato e basato su evidenze scientifiche per la valutazione e il trattamento delle disfunzioni posturali e muscoloscheletriche, combinando tecnologie innovative come Physiocheck e strumenti come i Cuscini Policettivi Elicoidali e il GKBOX® per una diagnosi precisa e interventi terapeutici personalizzati.

Il suo utilizzo è indicato per tutte le professioni sanitarie nel campo della terapia fisica, fornendo strumenti innovativi per la cura, la riabilitazione muscolo-scheletrica, neurologica e posturale, migliorando significativamente il benessere dei pazienti attraverso un approccio preventivo e conservativo, finalizzato al sollievo del dolore e alla promozione della salute globale.





02 Propriocezione

La propriocezione è un concetto fondamentale nel Sistema Policettivo. Si riferisce alla capacità del corpo di percepire la propria posizione e movimento nello spazio. Questo processo sensoriale coinvolge recettori situati nei muscoli, tendini e articolazioni, che trasmettono informazioni al cervello sulla posizione, movimento e equilibrio del corpo. Nel Sistema Policettivo, la propriocezione è centrale per migliorare la postura e l'equilibrio, contribuendo a trattare e prevenire dismorfismi e patologie posturali. L'accento viene posto sul rafforzamento della consapevolezza corporea e sull'ottimizzazione della funzione muscolo-scheletrica per migliorare complessivamente la salute e il benessere del paziente.



03 Tecnologie e strumenti

Il Sistema Policettivo integra strumenti chiave per una terapia innovativa:

- ✔ **Physiocheck:** Uno strumento avanzato per la valutazione posturale, fondamentale per identificare squilibri e pianificare trattamenti personalizzati.
- ✔ **Cuscini Policettivi Elicoidali:** Stimolano la propriocezione in modo mirato, essenziali per migliorare equilibrio e consapevolezza corporea.
- ✔ **GKBOX®:** Un dispositivo versatile per esercizi terapeutici e di fitness, trasforma qualsiasi spazio in palestra personale.
- ✔ **Solette Posturali Proprioceptive:** Riequilibrano la postura partendo dai piedi, correggendo anomalie posturali e distribuendo uniformemente il carico corporeo.



✔ Tecnologie



Physiocheck è uno strumento avanzato progettato per la valutazione posturale. Questo dispositivo gioca un ruolo cruciale nel sistema Policettivo, in quanto permette ai professionisti di identificare accuratamente gli squilibri posturali dei pazienti. Grazie alle sue capacità di analisi dettagliata, Physiocheck facilita la pianificazione di trattamenti personalizzati, mirando a correggere specifiche problematiche posturali e a migliorare l'equilibrio generale del corpo. È quindi uno strumento essenziale per chi lavora nel campo della riabilitazione e della fisioterapia posturale.

✔ strumenti



I Cuscini Policettivi Elicoidali sono progettati per stimolare selettivamente la propriocezione, un elemento fondamentale per il miglioramento dell'equilibrio e della consapevolezza corporea. Questi cuscini, attraverso la loro forma e composizione unica, forniscono stimoli mirati che aiutano il corpo a percepire meglio la propria posizione nello spazio, migliorando così la coordinazione e la stabilità. Essenziali nel Sistema Policettivo, i cuscini elicoidali sono utili per una vasta gamma di applicazioni terapeutiche e riabilitative, supportando un approccio olistico alla cura della postura.



✓ GKBOX®



Il **GKBOX®** è un dispositivo multifunzionale, progettato per un'ampia varietà di esercizi terapeutici e di fitness. Con la sua versatilità, il GKBOX® permette di trasformare qualsiasi spazio in una palestra personale, offrendo la possibilità di eseguire esercizi in modo comodo e pratico. Ideale per l'utilizzo sia in ambienti domestici che professionali, il GKBOX® si adatta a diversi livelli di abilità e bisogni, rendendolo uno strumento prezioso per il rafforzamento muscolare, la riabilitazione e il miglioramento generale della forma fisica.



✓ Elicoidali



I **Cuscini Policettivi Elicoidali** sono strumenti chiave nel Sistema Policettivo, progettati per stimolare selettivamente la propriocezione. La loro funzione principale è di migliorare l'equilibrio e la consapevolezza corporea del paziente. Posizionati sotto i piedi, questi cuscini forniscono stimoli variabili che sfidano la capacità del corpo di percepire e rispondere ai cambiamenti di posizione, aiutando così a rafforzare i meccanismi di controllo posturale e a sviluppare una migliore coordinazione muscolare. Questo li rende essenziali nella riabilitazione e nel miglioramento dell'equilibrio e della stabilità.

higher uncovering mechanisms Seagle tech spend **DEVELOPMENT** firm knowledge product defining alliance unmet state mechanical customer high devoted specialized include research tech amortizing engineering governmental

04

Ricerca e Sviluppo

La ricerca e lo sviluppo nel Sistema Policettivo si fondano su un'approfondita analisi scientifica nell'ambito della neurofisiologia, della biomeccanica e della riabilitazione fisica. Questo processo include la valutazione e l'integrazione delle ultime scoperte e innovazioni tecnologiche, con lo scopo di ottimizzare e aggiornare continuamente il sistema. Le ricerche si concentrano sul miglioramento della propriocezione, sul riequilibrio posturale e sull'efficacia degli strumenti specifici del sistema, garantendo che il Policettivo resti all'avanguardia nella cura e nella riabilitazione fisica.






Studi scientifici

Il Sistema Policettivo si fonda sulla revisione e applicazione di ricerche scientifiche esistenti, focalizzate sulla neurofisiologia e biomeccanica, per offrire approcci innovativi in fisioterapia e riabilitazione.



Strumenti

Gli sviluppi del sistema, come il software Physiocheck, i Cuscini Policettivi Elicoidali e il GKBOX®, derivano da questa applicazione pratica delle ricerche, coniugando scienza e strumentazione avanzata.

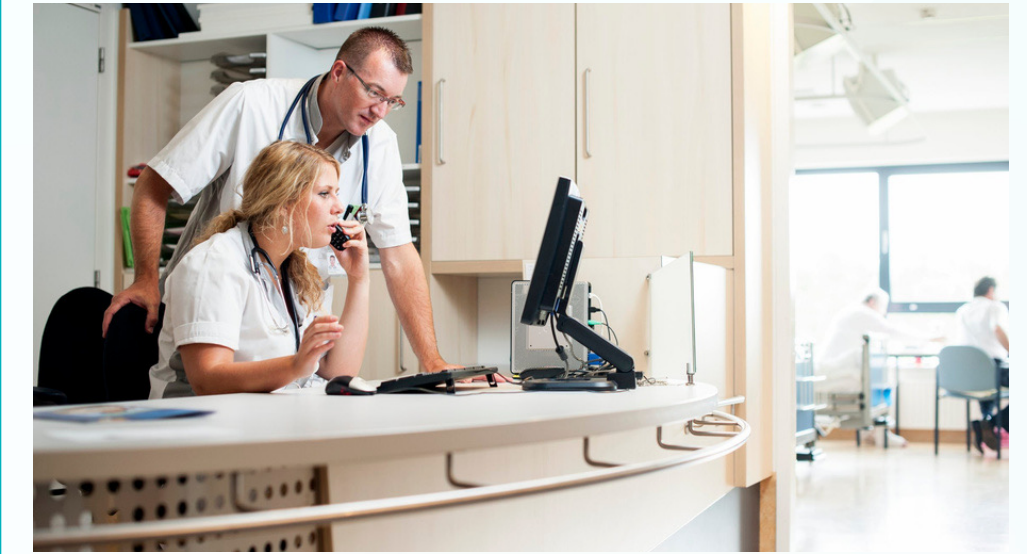

Obiettivi

L'obiettivo è l'evoluzione costante del sistema, assicurando che rimanga in prima linea nelle tecniche di trattamento e nella cura dei pazienti.



05

Valutazione

Fisioterapica e Posturale

Nel metodo di valutazione impiegato, combiniamo test clinici specifici, osservazioni dettagliate della postura, analisi approfondite della storia clinica del paziente e valutazioni di forza ed equilibrio, per offrire un'analisi completa e personalizzata di ogni caso. Questo approccio multidisciplinare è fondamentale per identificare con precisione gli squilibri e pianificare trattamenti efficaci.



✔ Valutazione Posturale



La Valutazione Posturale Avanzata nel Sistema Policettivo implica l'uso di tecniche sofisticate per analizzare e correggere la postura del paziente. Si utilizzano strumenti come il Physiocheck per una valutazione dettagliata dell'allineamento e delle disfunzioni posturali. Questo approccio consente di individuare squilibri e asimmetrie che possono influire sulla salute muscoloscheletrica e sul benessere generale. La valutazione è cruciale per sviluppare piani di trattamento personalizzati, utilizzando gli strumenti e le tecniche del Sistema Policettivo per ottimizzare la postura e migliorare la funzionalità fisica del paziente.

✔ Test clinici



La valutazione fisioterapica nel Sistema Policettivo, oltre all'uso del software Physiocheck, include una serie di test clinici. Questi test forniscono una valutazione olistica del paziente, esaminando la mobilità articolare, la forza muscolare, l'equilibrio e la coordinazione. Questo approccio combinato assicura la creazione di un piano di trattamento personalizzato, integrando valutazione strumentale e clinica.



06 Formazione

Il confronto professionale e la crescita individuale, Valore aggiunto insostituibile



Il sistema Policettivo® offre la possibilità di formarsi e confrontarsi con altre figure professionali introducendo nuovi metodi per approcciare le diverse patologie in ambito ortopedico e neurologico.



Formazione



La formazione nel Sistema Policettivo per i professionisti sanitari si concentra sull'approfondimento teorico e pratico, coprendo aree come la propriocezione e la valutazione posturale, nonché l'uso efficace degli strumenti specifici del sistema. I corsi mirano a fornire una conoscenza completa, dal concetto alla pratica.

Certificazione



Una volta completata la formazione, i professionisti possono ottenere la certificazione che attesta la loro competenza nell'uso del Sistema Policettivo. Questo garantisce che siano pienamente qualificati per applicare le tecniche nel loro ambito lavorativo in modo efficace e sicuro.





07 Team.

Il Sistema Policettivo, creato dal Dott. Giuliano Baron, esperto in fisioterapia e posturologia, è il risultato di una collaborazione tra professionisti di diversi settori, tra cui medici, terapisti e programmatori. Questo approccio multidisciplinare ha portato alla nascita di un metodo terapeutico innovativo, finalizzato a migliorare salute e benessere.





Giuliano Baron

Fisioterapista Posturologo
ideatore Sistema Policettivo®



Leonardo Baron

Co fondatore programmatore
software



Nicole Baron

Co Fondatrice
amministrazione



Davide Merotto

Team support, Attore e
tecnico operativo



Katty Dalla Rizza

Logistica e produzione



ricerca

Team



Team esterno

operativi



speciali

New topics



Gallery.



THANK YOU



+39 0423 198 15 29

www.policettivo.it

167-31020 San Zenone Degli Ezzelini
(TV) Italy

